


# Vergleich der Trainingsmethoden

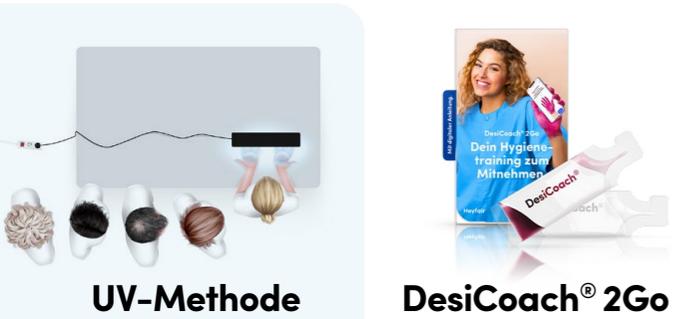

UV-Methode

DesiCoach® 2Go

## ABLAUF

Training vor Ort, nacheinander, mit Trainer

dezentral, unabhängig, ohne Trainer

## LERNINHALTE

korrekte Einreibetechnik

individuelle Menge, korrekte Einreibetechnik, richtige Reihenfolge

## ZEITAUFWAND

ca. 20 Minuten pro Person (je 1 min Training + Wartezeit)

ca. 5 Minuten pro Person

## PERSONALBINDUNG

Training nur mit Termin möglich

ohne Termin – einfach „zwischen durch“

## DOKUMENTATIONSAUFWAND

manuell, aufwendig

automatisch

## KOSTEN

300 - 1.000 € pro UV-Box + Trainer-Kosten

ca. 2 € pro Training



Das Problem  
Selbst erfahrene Fachkräfte machen unbemerkt Fehler bei der Händedesinfektion.

Die Lösung  
DesiCoach® macht Fehler im Training sichtbar, damit sie im Alltag nicht passieren.



Die Ziele  
DesiCoach® adressiert die 3 wichtigsten Lernziele.

Durch visuelles Feedback erarbeitet sich jeder Nutzer eine individuelle Technik zur wirksamen Desinfektion! Dabei verbindet das Training mit dem DesiCoach®-Färber und -Entfärber erstmals die drei wichtigsten Lernziele in einem Produkt. Und das ganz ohne zusätzliches Equipment. Du lernst:

- 1. Die individuelle Dosiermenge**  
Die richtige Menge für deine Handgröße
- 2. Die korrekte Einreibetechnik**  
Die effektivsten Handgriffe zur vollständigen Benetzung
- 3. Die richtige Reihenfolge beim Auftragen**  
Deine Routine zur Behebung von Schwachstellen

Noch Fragen?  
Wir helfen gern weiter.

Bei allen Fragen rund um DesiCoach® 2Go oder Hygienetrainings helfen wir dir gerne weiter. Ruf einfach an, schreib eine E-Mail oder besuche uns im Netz.

Du erreichst uns unter:

- www.heyfair.de
- hey@heyfair.de
- +49 (0) 3641 - 898 90 84
- Winzerlaer Str. 2, 07745 Jena

Antworten auf häufige Fragen findest du direkt unter:

[heyfair.de/#FAQ](https://www.heyfair.de/#FAQ)



DesiCoach® 2Go

Dein Hygiene-  
training zum  
Mitnehmen.



Klimaneutral  
produziert

Deine Herausforderung

## Deine Hygienetrainings kosten zu viel Zeit.

Jährliche Hygienetrainings für das gesamte Personal sind Pflicht im Gesundheitswesen, denn sie erhöhen messbar die Compliance der Händedesinfektion.

Diesem Standard jedoch jedes Jahr vollständig gerecht zu werden, ist mit konventionellen Methoden eine extrem zeitaufwendige Herausforderung.

### Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI)

Zur Gewährleistung der Compliance der Händehygiene ist **mindestens jährlich** (und zeitnah bei Hinweisen auf Probleme in diesem Bereich) eine **Schulung aller Mitarbeiter** zu den Indikationen der Händedesinfektion in Verbindung **mit einem Training** z. B. mit fluoreszierendem Farbstoff im HDM zu gewährleisten [Kat. IB].

Unsere Lösung

## Das Hygienetraining zum Mitnehmen.



So schön Gruppenschulungen auch sind, sie haben entscheidende Nachteile: gemeinsame Terminabstimmung, Organisations- und Dokumentationsaufwand, zeitliche Bindung des Personals sowie infektionsbedingte Ausfälle oder Kontaktbeschränkungen.

DesiCoach® 2Go ermöglicht erstmals individuelle Trainings abseits der gewohnten Gruppenschulungen.

Dein Team trainiert **eigenständig** – unterstützt durch eine Website, die das Training interaktiv begleitet sowie automatisch für dich auswertet und dokumentiert. Das spart Zeit, macht Spaß und erhöht die Compliance in deinem Team. So erfüllst du die RKI-Richtlinien zur Händehygiene im Handumdrehen. **Probier's aus!**

Interaktives Training mit klassischer Website auf dem Smartphone oder Computer. Ohne Installation, ohne App.

## So funktioniert das Training mit DesiCoach® 2Go:

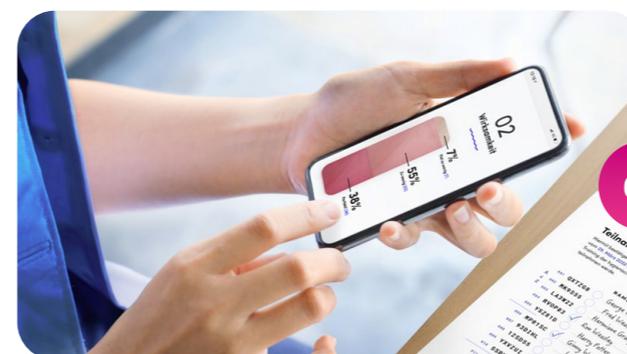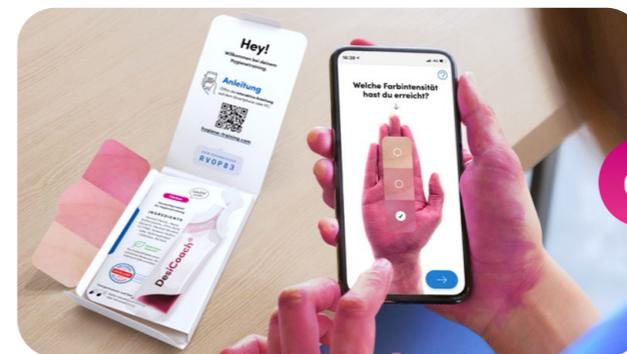

INHALT:

- je 4ml Färber und Entfärber
- Zugang zur interaktiven Anleitung
- Teilnahmeformular
- Zugang zur Auswertungsseite



### Verteilen

Verteile die Trainings an dein Team. Notiere dabei auf dem Teilnahmeformular welchen Zugangscodet jedes Teammitglied erhalten hat, wenn du die Durchführung der Trainings später prüfen möchtest.

Eine Bestellung enthält DesiCoach® 2Go-Trainings mit individuellem Zugangscodet zur interaktiven Anleitung, ein Teilnahmeformular und einen Zugang zur digitalen Auswertungsseite.

### Trainieren

Dein Team trainiert nun eigenständig mit DesiCoach® 2Go, unterstützt durch die interaktive Anleitung am Smartphone oder Computer. Einfach Trainings-Website öffnen und loslegen.

Wir erheben niemals personen- oder einrichtungsbezogene Daten. Die Ergebnisse des Trainings können freiwillig und 100% anonym zur Auswertung freigegeben werden. Die reine Teilnahme hingegen wird immer erfasst.

### Auswerten

Über eine separate und passwortgeschützte Auswertungs-Website kannst du, als Hygienefachkraft, die Ergebnisse einsehen. So kannst du deinen Dokumentationspflichten im Handumdrehen nachkommen.

Auf der Auswertungsseite siehst du die Anzahl der bereits durchgeführten Trainings sowie die Gruppenergebnisse zur Wirksamkeit und Benetzung. Du kannst sie auswerten, herunterladen und zur Verbesserung zukünftiger Trainings heranziehen.